




ROHO® Contour Base

Produktinformation

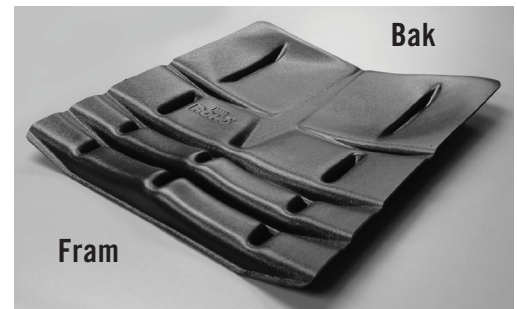

Storleks Guide*

Contour Base Artikel nummer	Contour Base Bredd x Djup	Standard sittdynan** 1R / 2R / ENH***	Select sittdynan** QS / CS***	MOSAIC sittdynan****
BASE1313	33.5 cm x 33 cm	77, 78, 87	77, 78, 87	N/A
BASE1515	38.5 cm x 38 cm	88, 89, 98	88, 89, 98	MOSAIC1616C, MOSAIC1616HD
BASE1715	43 cm x 38.5 cm	98, 99, 108, 109	98, 99, 108, 109	MOSAIC1816C, MOSAIC1816HD
BASE1717	43 cm x 44.5 cm	910, 1010	99, 910, 109, 1010	MOSAIC1818C, MOSAIC1818HD
Contour Base höjd: 1,0 cm				

* Dynornas celler bör inte ligga utanför omkretsen av Contour Base.

** Storleksguiden ger rekommendation på storlekar av Contour Base tillsammans med ROHO sittdynor. Måtten i storleksguiden för sittdynorna QUADTRO SELECT och CONTOUR SELECT är baserade på antalet luft celler. (Exempel: 1010 = 10-cells bredd x 10-cells djup)

*** Artikel nummer prefix

**** Produkt är inte alltid tillgängliga i alla länder. Kolla med din ROHO distributör.

Avsedd användning:

ROHO® Contour Base (Contour Base) är en anatomiskt formad sits som är avsedd att användas i kombination med ROHO sittdynor i syfte att minska effekten av hängmattesits hos rullstolar. Det finns ingen brukarviktgräns för Contour Base.

ROHO, Inc. rekommenderar att en kliniskt kunnig person, till exempel en läkare eller arbetsterapeut/sjukgymnast med erfarenhet av sittande och positionering, konsulteras för att avgöra vilken storlek på Contour Base som är lämpligt för brukarens specifika behov.


Placering:

Placera Contour Base i överdraget till sittdynan och under sittdynan enligt bilden ovan.

Rengöring och desinfektion:

Rengöring: Handtvätt med och mild rengöringsmedel i varmt vatten använd en svamp eller mjuk trasa eller mjuk borste. Skölj noggrant. Torka noggrant med en ren, mjuk trasa eller lufttorka

Desinfektion: Handtvätt med sedvanligt desinfektionsmedel, eller 1 del hushållsrengöringsmedel och 9 delar varmt vatten, använd en svamp eller mjuk trasa. Skölj noggrant. Torka noggrant med en ren, mjuk trasa eller lufttorka.

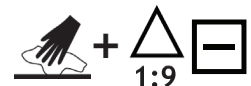

Tillverkad av ROHO, Inc., 100 N. Florida Ave., Belleville, IL 62221-5429 U.S.A. • cc@roho.com
USA 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449 Utanför USA 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518

12 månaders garanti. För mer information gällande garantin kontakta Kundservice för ert lands ROHO distributör.

Produkter i detta dokument kan omfattas av en eller flera amerikanska och utländska patent och varumärken. För ytterligare information hänvisas till www.roho.com.

ROHO® är ett registrerat varumärke som tillhör ROHO, Inc.

ROHO, Inc. har en policy av ständig produktutveckling och förbehåller sig rätten att ändra detta dokument. En aktuell version av det här dokumentet finns på www.roho.com.

© 2013, 2014 ROHO, Inc.

