



## ROHO® DRY FLOATATION® pyörätuolin tyynyt Käyttöohje

Toimittajalle tiedoksi: Tämä ohje tulee antaa tuotteen käyttäjälle.

Käyttäjä (potilas tai hoitaja): Lue ohjeet ennen tämän tuotteen käyttöä ja säästä ne myöhempiä käyttöä varten.

### Sisältö

Käyttötarkoitus	92
Tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja	93
Osat	94
Tuotteen tiedot	94-95
Tyynyn säätö	96-98
Päällisen irrotus ja vaihtaminen	99
Ongelmanratkaisu	99
Puhdistus ja desinfiointi	100
Hävittäminen	100
Rajoitettu takuu	100



ROHO, Inc., 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429

Yhdysvallat: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449

Paikallinen ROHO asiakaspalvelu/toimittaja : cc@roho.com

Yhdysvaltojen ulkopuolella: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518 • intl@roho.com

ROHO.com

© 2007, 2016 ROHO, Inc.

Seuraavat ovat ROHO, Inc.:in omistamia tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä: ROHO®, DRY FLOATATION®, ISOFLO®, Yellow Ropev, shape fitting technology®, CONTOUR SELECT®, ENHANCER®, QUADTRO SELECT®, HIGH PROFILE®, MID PROFILE®, ja LOW PROFILE®.

Tämän käyttöohjeen tuotteita saattaa koskea yksi tai useampi Yhdysvaltain ja ulkomainen patenti ja tavaramerkki. Katso lisätietoja osoitteesta ROHO.com.

ROHO, Inc.:llä on jatkuvan tuotekehityksen periaate ja se varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa. Nykyinen versio tästä asiakirjasta on saatavilla osoitteessa ROHO.com.

s h a p e f i t t i n g t e c h n o l o g y ®

## Käyttötarkoitus

Jokainen tämän käyttöohjeen ROHO DRY FLOATATION -tuote on säädettävä, ilmatäytteinen, ilmakennoihin perustuva pyörätuolin tukipinta. Painorajoitusta ei ole, mutta tyynyn on oltava potilaalle oikein mitoitettu.

ROHO, Inc. suosittelee, että istumiseen, asemointiin ja liikkuvuuteen erikoistunut klinikko suorittaa arvioinnin: 1) määrittääkseen onko tyyny sopiva potilaalle; ja 2) määrittääkseen onko kiinteä istuinkoroke suositeltava mikäli tyynyä käytetään pyörätuolissa, jossa on taittuva istuin.

Kaikki seuraavat tuotteet hyödyntävät DRY FLOATATION -teknologiaa ja on tarkoitettu noudattamaan potilaan istuma-asentoa tarjoten suojaa iholle/pehmytkudokselle, hyvän asennon ja olosuhteet, jotka helpottavat haavan paranemista.

- ROHO® LOW PROFILE® kaksoiskammioinen tyyny (LOW PROFILE kaksoiskammioinen tyyny)
- ROHO® MID PROFILE™ kaksoiskammioinen tyyny (MID PROFILE kaksoiskammioinen tyyny)
- ROHO® HIGH PROFILE® kaksoiskammioinen tyyny (HIGH PROFILE kaksoiskammioinen tyyny)
- ROHO® QUADTRO SELECT® LOW PROFILE® tyyny (QUADTRO SELECT LOW PROFILE)
- ROHO® QUADTRO SELECT MID PROFILE™ tyyny (QUADTRO SELECT MID PROFILE)
- ROHO® QUADTRO SELECT HIGH PROFILE® tyyny (QUADTRO SELECT HIGH PROFILE)
- ROHO® CONTOUR SELECT® tyyny (CONTOUR SELECT)
- ROHO® ENHANCER® tyyny (ENHANCER)

Kaikki seuraavat tuotteet hyödyntävät DRY FLOATATION® -teknologiaa ja on tarkoitettu noudattamaan potilaan istuma-asentoa tarjoten suojaa iholle/pehmytkudokselle ja olosuhteet, jotka helpottavat haavan paranemista.

- ROHO® LOW PROFILE® yksikammioinen tyyny (LOW PROFILE yksikammioinen tyyny)
- ROHO® MID PROFILE™ yksikammioinen tyyny (MID PROFILE yksikammioinen tyyny)
- ROHO® HIGH PROFILE® yksikammioinen tyyny (HIGH PROFILE yksikammioinen tyyny)



## Tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja

ROHO -tuotteet on tarkoitettu toimimaan osana kokonaisvaltaista hoitosuunnitelmaa. ROHO, Inc. suosittelee, että potilastyötä tekevä lääkäri tekee suosituksia tuotteiden käytöstä perustuen potilaan yksilöllisiin lääketieteellisiin ja hoidollisiin tarpeisiin ja hänen yleistilaansa.



### Varoitukset

- Iho/pehmytkudoksen vaurioita voi tulla useista eri syistä, jotka vaihtelevat henkilökohtaisesti. Tarkista iho vähintään kerran päivässä. Punoitus, ruhjeet tai tummat alueet (verrattuna terveeseen ihoon) voivat olla merkki alkavasta pehmytkudoksen rikkoutumisesta ja siihen on ehkä puututtava. Jos ihossa/pehmytkudoksessa on värimuutoksia, LOPETA KÄYTTÖ välittömästi. Jos värimuutos ei häviä 30 minuutin kuluessa käytön lopettamisesta, ota välittömästi yhteyttä terveydenhoitoalan ammattilaiseen.
- Tyyntyn ja päällisen ON oltava kooltaan yhteensopivia, ja niitä ON käytettävä tämän käyttöohjeen mukaisesti. JOS NE EIVÄT OLE: 1) Tyyntyn hyödylliset vaikutukset saattavat heikentyä tai mitätöityä, kasvattaen ihon ja muun pehmytkudoksen vaurioitumisriskiä ja 2) käyttäjän istuma-asento saattaa muuttua epävakaaksi ja altistaa putoamiselle tuolista.
- ÄLÄ käytä tyyntä muiden kuin tässä käyttöohjeessa mainittujen tuotteiden tai materiaalien päällä tai yhdessä niiden kanssa. Toimiminen vastoin tätä ohjetta saattaa heikentää käyttäjän istuma-asennon vakautta ja altistaa putoamiselle tuolista.
- ÄLÄ käytä tyyntä vesikellukkeena (esim. pelastusrenkaana). Se EI kannattele käyttäjää vedessä.
- Jos jonkin tässä käyttöohjeessa kuvatun toimenpiteen suorittaminen ei onnistu, hanki apua.

### Varoitukset:

- ÄLÄ käytä muita kuin ROHO Inc:n toimittamaa pumppua, päällistä tai korjaussarjaa, koska se voi mitätöidä tuotteesi takuun.
- ÄLÄ muokkaa tyyntä tai sen osia. Muutoin tuote saattaa vaurioitua ja takuu mitätöityy.
- ÄLÄ anna tyyntyn joutua kosketuksiin öljypohjaisten nesteiden tai lanoliinin kanssa. Ne saattavat vaurioittaa sen materiaalia.
- Pitkittänyt altistuminen otsonille voi heikentää tyyntynsä käytettyjä materiaaleja, vaikuttaa tyyntyn toimintaan ja mitätöidä tuotteen takuun.
- Korkeuserojen muutokset saattavat edellyttää tyyntyn säätämistä.
- Pidä tyyntä poissa terävien esineiden ulottuvilta.
- ÄLÄ altista tyyntä korkealle kuumuudelle, avotulelle tai kuumalle tuhkalta.
- Jos tyyntä on ollut alle 0 °C (32 °F) lämpötilassa ja on epätavallisen jäykkä, anna sen lämmitä huoneenlämpöiseksi.
- ÄLÄ KÄYTÄ täyttövientiiliä kantokahvana tai vedä siitä DRY FLOATATION -pehmustetyntä. Kanna pehmustetyntä tyyntyn pohjasta tai päällisen kantokahvasta.

## Osat

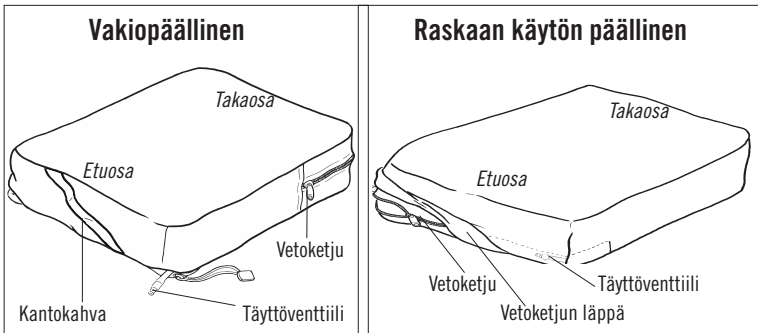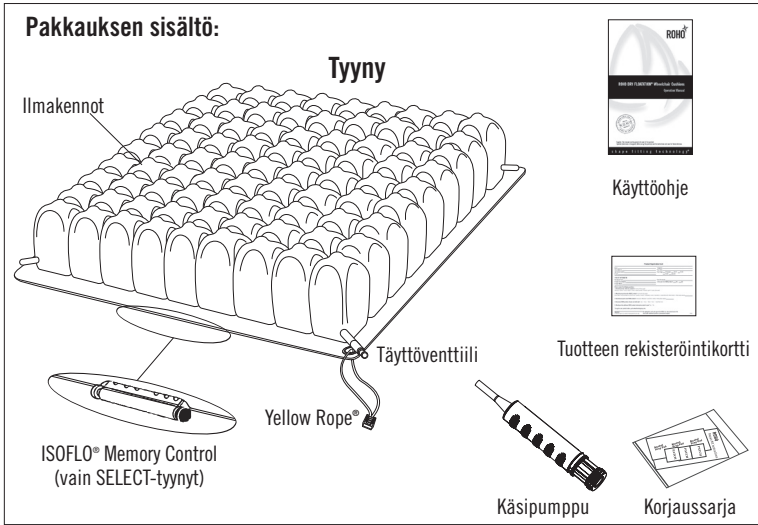

*Kun haluat tilata varaosia, ota yhteys tuotteen toimittajaan tai ROHOon tai vieraille osoitteessa [therohostore.com](http://therohostore.com).*

## Tuotteen tiedot

**Tyyny:** neopreenikumi; valmistettu ilman lateksia

**Täyttöventtiili:** nikkelipinnoitettu messinki

**Vakiopäällinen:** kahteen suuntaan venyvä päällisosa, spacer-kankaiset sivut, vetoketju päällisen takaosassa; liukumaton alaosa koukku- ja lenkkikiinnittimillä, jotka auttavat tyynyn kiinnittämisessä tuoliin. Katso materiaalin valmistusaine päällisen hoitoetiketistä.

**Raskaan käytön päällinen:** kahteen suuntaan venyvä, nestettä hylkivä päällisosa ja sivut, vetoketju päällisen etuosassa; ja liukumaton alaosa koukku- ja lenkkikiinnittimillä, jotka auttavat tyynyn kiinnittämisessä tuoliin. Katso päällisen hoito -merkistä materiaalisäliltö.

## Tuotteen tekniset tiedot, jatkuu

VAKIOTYYNNYIN MITAT JA PAINOT:		
tyyny	Korkeus	Keskimääräinen paino*
LOW PROFILE yksikammioinen tyyny	2¼ in. (5,5 cm)	2,5 lbs. (1,1 kg)
LOW PROFILE kaksoiskammioinen tyyny	2¼ in. (5,5 cm)	2,5 lbs. (1,1 kg)
QUADTRO SELECT LOW PROFILE	2¼ in. (5,5 cm)	2,5 lbs. (1,1 kg)
MID PROFILE YKSIKAMMIOINEN tyyny	3¼ in. (8,5 cm)	3,0 lbs. (1,4 kg)
MID PROFILE kaksoiskammioinen tyyny	3¼ in. (8,5 cm)	3,0 lbs. (1,4 kg)
QUADTRO SELECT MID PROFILE	3¼ in. (8,5 cm)	3,0 lbs. (1,4 kg)
HIGH PROFILE yksikammioinen tyyny	4¼ in. (10,5 cm)	3,25 lbs. (1,5 kg)
HIGH PROFILE kaksoiskammioinen tyyny	4¼ in. (10,5 cm)	3,25 lbs. (1,5 kg)
QUADTRO SELECT HIGH PROFILE	4¼ in. (10,5 cm)	3,25 lbs. (1,5 kg)
CONTOUR SELECT	2¼ - 4¼ in. (5,5 - 10,5 cm)	3,5 lbs. (1,6 kg)
ENHANCER	2¼ - 4¼ in. (5,5 - 10,5 cm)	3,5 lbs. (1,6 kg)

\*Huomaa: Keskimääräiset painot perustuvat tyynyihin, jotka on varustettu 9 x 9 ilmakennoilla (16½ in. x 16½ in., 42,0 cm x 42,0 cm).

Tyyny	Pienin leveys			Pienin syvyys			Suurin leveys			Suurin syvyys		
	# ilmakennoa	in.	cm	# ilmakennoa	in.	cm	# ilmakennoa	in.	cm	# ilmakennoa	in.	cm
LOW PROFILE yksikammioinen tyyny	6	11½	29,0	6	11½	29,0	13	23½	59,5	11	20	50,5
LOW PROFILE kaksoiskammioinen tyyny	6	11½	29,0	6	11½	29,0	11	20	50,5	11	20	50,5
QUADTRO SELECT LOW PROFILE	5	11	28,0	6	11¾	30,0	13	24½	62,5	12	22	56,0
MID PROFILE yksikammioinen tyyny	7	13¼	33,5	7	13¼	33,5	11	20	50,5	11	20	50,5
MID PROFILE kaksoiskammioinen tyyny	8	14¾	37,5	9	16½	42,0	8	14¾	37,5	9	16½	42,0
QUADTRO SELECT MID PROFILE	8	16	41,0	8	15¾	38,5	10	19½	49,5	10	18½	47,0
HIGH PROFILE yksikammioinen tyyny	6	11½	29,0	6	11½	29,0	15	26¾	68,0	13	23½	59,5
HIGH PROFILE kaksoiskammioinen tyyny	6	11½	29,0	6	11½	29,0	11	20	50,5	12	21¾	55,0
QUADTRO SELECT HIGH PROFILE	6	12¾	32,5	6	11¾	30,0	14	26¾	67,0	13	23¾	60,0
CONTOUR SELECT	7	14½	36,5	8	15¾	38,5	13	24½	62,5	12	22	56,0
ENHANCER	8	14¾	37,5	8	14¾	37,5	11	20	50,5	11	20	50,5

Huomio: Katso paikallisen ROHO asiakaspalvelun/toimittajan tiedot tyynjen koosta.

## Tyynyn säätö




### Tärkeää turvallisuustietoa:


- Tarkista säännöllisesti, vähintään kerran päivässä, että tyyny on oikein täyttynyt!
- **ÄLÄ** käytä vajaatäytettyä tai ylitäytettyä tyynyä, koska muutoin tyynyn hyödylliset vaikutukset heikentyvät tai mitätöityvät kokonaan, kasvattaen ihon ja muun pehmytkudoksen vaurioitumisriskiä. Jos tyyny ei tunnu pitävän ilmaa sisällään tai jos ilman lisääminen tai vähentäminen ei onnistu, katso kohta Ongelmanratkaisu. Jos ongelmaa ei saada korjattua, ota viipymättä yhteyttä lääkäriisi/hoitohenkilökuntaan, tuotteen jälleenmyyjään tai ROHO, Inc:iin.
- Mikäli mahdollista, käytä koukku- tai silmukkakiinnittimiä kiinnittääksesi tyynyn lujasti istuinpintaan.

### 1. Täytä tyyny:


- a. Aseta tyyny pyörätuoliin siten, että ilmakennot osoittavat ylöspäin ja päällisen luistamaton pinta osoittaa alaspäin. Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta täyttöventtiilien vaihtoehtoisista asennoista.

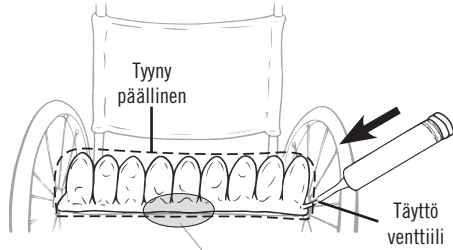

- b. **SELECT-tyynyille:** Avaa ennen täyttöä ISOFLO Memory Control niin, että kaikki ilmakennot täyttyvät. Työnnä vihreä ISOFLO-nappula lukitsematon-asentoon.

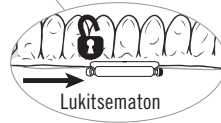

- c. Liu'uta käsipumpun kumisuutin täyttöventtiilin yli. Purista suutinta, käännä avataksesi täyttöventtiilin ja täytä ilmakennot.

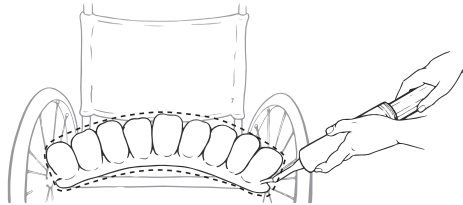

- d. Kun kaikki ilmakennot on täytetty ja tyyny alkaa täyttyä hieman, purista käsipumpun kumisuutinta ja käännä sulkeaksesi täyttöventtiilin kokonaan.




- e. Irrota käsipumppu.  
f. Toista tyynyn täyttö kaikille venttiileille.

## Tyynyn säätö, jatkuu

### 2. Säädä tyyny:

**Huomautus kaksoiskammioisille tyynyille:** Potilaille, joilla on lantion vinouma, säädä ensin se puoli, jolla on syvemmät luu-ulokkeet. Etu-taka-suunnan asennon säätämiseksi säädä takaosa ensin. Tarkista aina uudelleen kunkin osion säätö.

- Potilaan on istuttava tuolissa tavanomaisessa asennossaan. Tyyny on keskitettävä potilaan alle.
- Liu'uta kätesi tyynyn ja potilaan väliin. Nosta jalkaa kevyesti, tunnustele alimman luu-ulokkeen sijainti ja laske jalka istuma-asentoon.
- Avaa venttiili poistaaksesi ilman, pitäen kättäsi potilaan alimman luu-ulokkeen alla.
- Päästä ilmaa pois kunnes pystyt juuri ja juuri liikuttamaan sormenpäitäsi
- Sulje venttiili
- Toista tyynyn säätö kaikille venttiileille.

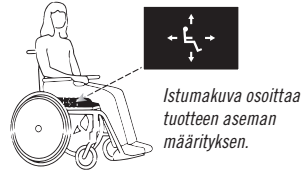


- QUADTRO SELECT - tai CONTOUR SELECT -pehmusteen säätäminen pysyvän lantion vinouden tai posteriorisen lantion kallistuksen muokkaamiseksi:**


Potilaan on istuttava tavanomaisessa asennossaan, kun ilma siirtyy ISOFLO Memory Control:in läpi. Kun ilma on siirtynyt, paina punainen nappula lukitusasentoon. Tarkista tyynyn jokainen kammiot varmistaaksesi tyynyn asianmukaisen täyttymisen.

#### Oikea tyynyn täyttöasetus:

- A) Painu alas tyynyn ja B) "kellu" tyynyn alustan päällä.

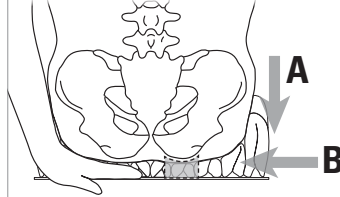

 = 1/2" - 1" (1.5 cm - 2.5 cm) suositeltu etäisyys potilaan ja istuinpinnan välillä

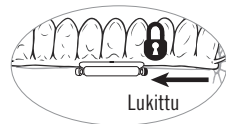

**Huomautus:** Tutustu seuraavalla sivulla oleviin ohjeisiin säätääksesi QUADTRO SELECT -pehmustetta korjataksesi lantion joustavaa vinoutta tai lantion joustavaa posteriorista kallistumista.

## Tyynyn säätö, jatkuu

### h. QUADRO SELECT -pehmusteen säätäminen lantion joustavan vinouden tai lantion joustavan posteriorisen kallistumisen korjaamiseksi.

- Noudata kaikkia tässä käyttöohjeessa olevia Pehmusteen säätöohjeita varmistaaksesi, että pehmusteessa on oikea täyttöaste.
- Varmista, että ISOFLO Memory Control on auki-asennossa.
- Seuraa alla olevia ohjeita.




#### Joustava lantion vinous:

1) Korjaa lantion asento halutuksi manuaalisesti. (Esimerkiksi, jos lantion vasen puoli on oikeaa alempana, kallista henkilöä oikealle tai paina oikeanpuoleista lonkkaa alaspäin kunnes saavutetaan haluttu asento.)

2) Lukitse punainen nappi.

3) Tarkista pehmusteen jokainen osio uudelleen varmistaaksesi pehmusteen oikean täyttöasteen.

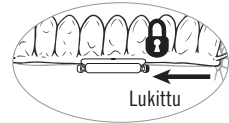

#### Lantion joustava posteriorinen kallistuminen:

1) Varmista, että henkilön luukohoumien ja istuimen välissä on noin 2,5 cm verran tilaa. Lisää tarvittaessa ilmaa.

2) Nosta henkilön molempia jalkoja painaaksesi lantiota enemmän alaspäin ja pakottaaksesi ilman pehmusteen etuosaan. Tämä saa aikaan "altaan" (matalampi, kovera alue) lantiolle ja estää lantion luisumista eteenpäin.

3) Lukitse punainen nappi.

4) Tarkista pehmusteen jokainen osio uudelleen varmistaaksesi pehmusteen oikean täyttöasteen.



## Päällisen irrotus ja vaihtaminen



**Tarkista päällinen vaurioiden varalta ja korvaa tarvittaessa.**

Päällisen pitäminen tynnyin päällä auttaa suojaamaan tynnyin osia. Lisäksi päällinen auttaa pitämään ilmakennot yhdessä, mikä saattaa auttaa myös liukulaudan avulla tapahtuvissa siirroissa.

**Päällisen irrotus:** Avaa vetoketju, ja irrota päällinen tynnyistä.

**Päällisen vaihtaminen:**

1. Käännä päällinen ja tynny ylösalaisin: liukumattoman materiaalin on oltava ylöspäin ja vetoketjulla suljetun aukon sinuun päin. Ilmakenttojen on oltava alaspäin.
2. Aseta tynny päällisen sisään noudattaen seuraavia ohjeita.

Katso tynnyin pohjassa sijaitsevasta merkistä ja päällisen kuvasta suunnataksesi tynnyin ja päällisen oikein.



Vakiopäällisen ohjeet	Raskaan käytön päällisen ohjeet
Tynnyin takaosan on oltava vetoketjuun päin.	Tynnyin etuosan (täyttöventtiili) on oltava vetoketjuun päin.
Varmista, että kaikki neljä tynnyin kulmaa ulottuvat päällisen kulma-aukkojen läpi. Vedä varovasti täyttöventtiili ja Yellow Rope aukkojen läpi.	Työnnä täyttöventtiili ja Yellow Rope päällisen sisään.
Sulje vetoketju kokonaan. Käännä tynny siten, että ilmakentto osoittavat ylöspäin. Tynnyin on oltava litteänä päällisen sisällä liukumaton materiaali pohjalla ja kaikki ilmakentto peitettyinä.	

## Ongelmanratkaisu

Lisäapua saat hoitohenkilökunnalta, tuotteen jälleenmyyjältä tai ROHO, Inc.:ltä.

<b>Ilma ei pysy sisällä</b>	Täytä tynny. Tarkista, onko täyttöventtiili tai letku vahingoittunut. Varmista, että täyttöventtiili on täysin suljettu. Tutki tynny reikiin varalta. Jos löytyy hyvin pieniä reikiä tai niitä ei löydy ollenkaan, seuraa tuotteen mukana Korjaussarjassa tulevia ohjeita. Jos täyttöventtiili tai letku ovat vahingoittuneet, tai jos tynnyssä on isoja reikiä tai vuotoja, katso ROHO Rajoitettu takuu -liite tai ota yhteys paikalliseen ROHO asiakaspalveluun/toimittajaan.
<b>Tynnyin täyttö tai tyhjennys ei onnistu</b>	Varmista, että täyttöventtiili on auki. Tarkista, onko täyttöventtiili tai letku vahingoittunut. Täytettäessä SELECT tynnyjä: varmista, että ISOFLO Memory Control:in vihreä nappula on työnnetty ISOFLO:n keskustaa kohti LUKITSEMATON-asentoon, niin että kaikki kammiot täyttyvät.
<b>Epämukava tai epävakaa</b>	Varmista, että: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tynny ei ole ylitäytetty (Katso Tynnyin säätö.)</li> <li>- tynnyin ilmakentto ja päällisen yläpinta ovat ylöspäin.</li> <li>- tynny on keskitetty potilaan alle.</li> <li>- tynny on mitoitettu oikein potilaalle ja pyörätuolille.</li> </ul> Anna potilaan mukautua tynnyin vähintään tunnin ajan.
<b>Tynny liikuu pyörätuolissa</b>	Varmista, että tynnyin päällisen liukumaton alaosa on pois päin potilaasta. Käytä tynnyin ja päällisen suuntaavia merkkejä asettaaksesi tynnyin. Käytä koukku- ja lenkkiinnittimiä kiinnittääksesi tynnyin kunnolla pyörätuoliin.

## Puhdistus ja desinfiointi

Puhdistus ja desinfiointi ovat erillisiä toimenpiteitä. Puhdistus on suoritettava ennen desinfiointia. Ennen käyttöä toisella potilaalla: puhdistu, desinfioidi ja tarkista, että tuote toimii oikein.

**Päällisen hoito:** Poista koukkukiinnitysten osat päällisen alareunasta ennen puhdistusta ja desinfiointia. Pese samanväristen kanssa.

**Päällisen puhdistus:** Poista päällinen. Konepesu viileässä vedessä (30 °C) miedolla pesuaineella, varovainen linkous, tai pyyhitään puhtaaksi neutraalilla pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Rumpukuivaus matalalla lämmöllä.



**Päällisen desinfiointi:** Käsipesu viileässä vedessä (30 °C) käyttämällä 1 osa kotitalouskäyttöön tarkoitettua nestemäistä valkaisuainetta 9 litraan



+



tai



vettä. Pidä tuotetta valkaisuaineliuoksessa 10 minuuttia, huuho huolellisesti. Tai pese koneessa kuumassa vedessä (60 °C). Rumpukuivaus matalalla lämmöllä.



**Noudata valkaisuainepakkauksen turvaohjeita.**



**Päällisen hoidossa huomioitavaa:** Venttiilien on oltava suljettuina. **ÄLÄ PÄÄSTÄ** vettä tai puhdistusliuosta tyynyn sisälle. **ÄLÄ** pese tai desinfioidi tyynyä koneessa tai kuivaa sitä koneellisesti. Seuraavien välineiden, menetelmien tai aineiden käyttö saattaa vaurioittaa tyynyä: naarmuttavat materiaalit (teräsvilla, hankaussienet); syövyttävät aineet, astianpesukoneen pesuaineet; bensiiniä tai orgaanisia liuottimia sisältävät puhdistusaineet, esim. Asetoni, tolueni, metyylietyyliketoni (MEK), teollisuusbensiini, kuivapuhdistusnesteet, liimanpoistoaineet; öljypohjaiset liuokset, lanoliini tai fenolipohjaiset desinfiointiaineet; otsoni; ultraviolettalopuhdistus.

**Tyynyn puhdistus:** Poista päällinen, sulje venttiili(t) ja aseta suureen pesualtaaseen. Käsipesu miedolla nestesaippualla, käsitiskiaineella, pyykinpesuaineella tai yleispuhdistusaineella (noudata tuotteen käyttöohjeita). Hiero varovasti kaikki päällisen kohdat puhtaaksi käyttäen pehmeää muoviharjaa, sientä tai liinaa. Huuhtelee puhtaalla vedellä. Ilmakuivaus. **ÄLÄ** altista suoralle auringonvalolle.

**Tyynyn desinfiointi:** Toista puhdistuksen vaiheet käyttäen 1 osa kotitalouskäyttöön tarkoitettua valkaisuainetta 9 osaan vettä. Pidä tuotetta valkaisuaineliuoksessa 10 minuuttia. Huuho huolellisesti puhtaalla vedellä. Ilmakuivaus.

Huom: Useimmat bakteereja tappavat desinfiointiaineet ovat turvallisia, jos käytössä noudatetaan aineen valmistajan laimennusohjeita.



**Noudata valkaisuainepakkauksen turvaohjeita.**



Huomaa sterilointiin liittyen: Korkeat lämpötilat nopeuttavat ikääntymistä ja vaurioittavat tuotteen rakennetta. ROHO-tuotteet eivät ole steriilisti pakattuja, eikä niitä tarvitse steriloida ennen käyttöä. Jos laitoksen käytänteet vaativat sterilointia: Toimi ensin puhdistus- ja desinfiointiohjeiden mukaisesti, avaa sitten täyttöventtiili ja käytä alhaisinta mahdollista sterilointilämpötilaa, joka ei saa ylittää 60°C, sekä mahdollisimman lyhyttä sterilointiaikaa. EI SAA käsitellä autoklaavissa.

**Hävittäminen:** Kun tuotetta käytetään ja se hävitetään paikallisten/alueellisten ohjeiden mukaisesti, ei tässä ohjeessa kuvattuihin tuotteen osiin liity tunnettuja ympäristöriskejä. Hävittäminen tulee jättää pätevän, valtuutetun jätehuolto-organisaation tehtäväksi.

**Rajoitettu takuu:** Rajoitetun takuun ehdot tuotteen alkuperäiseltä ostopäivämäärältä: SELECT-tyynyt 36 kuukautta; kaikki muut DRY FLOATATION-tuotteet: 24 kuukautta. Takuu ei koske puhkeamisia, repeytymiä, palamisvaurioita tai väärinkäyttöä, eikä se koske irrotettavaa päällistä. Katso myös tuotteen mukana toimitettu ROHO Rajoitettu takuu -liite tai ota yhteyttä paikalliseen ROHO asiakaspalveluun/toimittajaan.



Mailing/Shipping Address:  
1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

Administrative Offices:  
100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA  
U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449  
Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

ROHO.com



The Quality Management System  
of ROHO, Inc. is certified to  
ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.

T20200  
Revision: 1/27/16  
Print Date:

Qty:



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany

