

Anpassad ROHO® AGILITY® ryggstöds dyna tillägg

Leverantör: Dessa instruktioner måste ges till användaren av produkten.

Operatör (person eller vårdgivare): Läs instruktionerna före användning av denna produkt och spara dem för framtida bruk.



Detta dokument tillhandahålls som ett komplement till produktinformationen som medföljer ROHO AGILITY Ryggssystem och ROHO AGILITY Ryggssystem Hårdvara, vilket inkluderar:

- | | |
|---|---|
| - DELAR I DETALJ OCH PRODUKTSPECIFIKATIONER | - VÄND TILLBAKA BAKSTYCKETS HÖLJE |
| - INSTALLATION AV BAKSTYCKETS HÅRDVARA | - BORTTAGNING OCH INSTALLATION AV ÖVERRAG |
| - INSTALLATION OCH BORTTAGNING AV BAKSTYCKE | - BORTTAGNING OCH INSTALLATION AV ÖVERDRAGETS DELAR |
| - INSTALLATION OCH BORTTAGNING AV AGILITY | - TILLBEHÖR |
| - HÖJJUSTERING OCH SITTDJUP OCH VINKELJUSTERING | - FELSÖKNING, UNDERHÅLL, AVFALLSHANTERING, RENGÖRING OCH DESINFEKTION |
| - BEGRÄNSAD GARANTI: BAKSKAL, METALLDELAR | |

Den anpassade ROHO® AGILITY® Ryggdynan (Custom AGILITY Ryggdyna) är en specialanpassad produkt utformad för att möta patientens specifika behov. Den förskrivande läkaren bör kontaktas för frågor om den fullständiga avsedda användningen av denna beställningsprodukt.

Produktspecifikationer

Material: neoprengummi, tillverkad utan latex, uppblåsningsventil i förnicklad mässing, polyetylenkum



Säkerhetsinformation



Varning: Långvarig exponering för ozon kan försämra materialet som används i denna produkt, påverka dess prestanda och göra garantin ogiltig.

DRY FLOATATION® Dynan : Justeringsinstruktioner

1. Placera ryggstödsdynan på ryggskalet, med luftceller vända mot personen. Använd kardborrspännet för att säkra den bakre sittdynan till ryggstödet kåpa.
2. Öppna ventilen (A). Skjut handpumpens gummimunstycke över ventilen. Pumpa tills luften böjer ytan något (B). Tag bort handpumpen och stäng ventilen. (Upprepa detta för varje ventilsektion tills hela inlägget är uppblåst.)
3. Patienten skall sitta i sin vanliga sittposition. Kontrollera att den bakre dynan är korrekt placerad bakom patienten.
4. Justera inpumpad luft efter behov. Se till att det finns minst ½ tum (1,5 cm) av luft som stöder patientens benuskott.
5. Kontrollera att alla ventiler är stängda efter justeringen är klar.

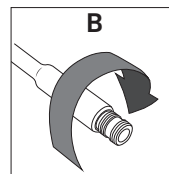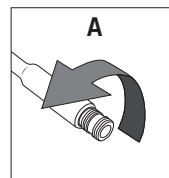

Varning: KONTROLLERA LUFTMÄNGDEN! Se till att det finns minst ½ tum (1,5 cm) av luft som stöder patientens benuskott. Följ instruktionens rekommenderade pumpning.

DRY FLOATATION Dynan : Rengöring och desinfektion



ANVÄND INTE:

- maskintvätt eller maskinell torrluft
- använd inte slipande material som stålull eller skursvampar
- använd inte frätande, tvätt- och rengöringsmedel för diskmaskin
- rengöringsmedel som innehåller petroleum eller organiska lösningsmedel som aceton, toluen, metyletylketon (MEK), nafta, kemtvättande vätskor och självhäftande etylenklorid
- låt inte vatten eller rengöringslösning tränga in i produkten
- utsätt inte produkten för ultraviolett ljus eller rengöringsmetoder med ozongas
- använd inte oljebaserade medel, lanolin, eller fenol-baserade desinfektionsmedel

Rengör DRY FLOATATION dynan: Ta bort luftinmatning från kåpan och skumgummit, stäng ventilen(-rna) och placera i stor balja. Handtvätta, med hjälp av mild flytande handtvål, handdiskmedel, tvättmedel, eller ett mångsidigt rengöringsmedel (Följ produkt anvisningarna på etiketten.) Skrubba försiktigt alla dynor, med en mjuk plastborste, en svamp eller en trasa. Skölj noga med rent vatten. Lufttorka. **UTSÄTT INTE** för direkt solljus.

Desinficera DRY FLOATATION dynan: Upprepa rengöringsinstruktioner, med hjälp av en del flytande hushållsblekmedel per 9 delar vatten. Håll produkten våt med blekmedelslösningen under 10 minuter och skölj sedan noga. Skölj noga med rent vatten. Lufttorka. Obs: De flesta bakteriedödande desinfektionsmedel är säkra om de används enligt desinfektionsmedelstillverkarens utspädningsdirektiv.



Följ säkerhetsföreskrifterna på blekmedelsförpackningen.



Obs om sterilisering: Höga temperaturer påskyndar åldrandet och kan skada produktmonteringen. ROHO-produkter är inte förpackade i ett sterilt tillstånd, och varken avser eller kräver sterilisering före användning. Om institutionens regelverk kräver sterilisering: Följ först instruktionerna om rengöring och desinfektion, öppna sedan luftventilen och använd lägsta möjliga steriliseringstemperatur, utan att överstiga överstiga 60 °C, under kortast möjliga tid. Använd **INTE** autoklav.

Begränsad garanti

Begränsade garantivillkor från den dag då produkten ursprungligen köptes: DRY FLOATATION® DYNAN: 36 månader; överdrag och skumdyna: 18 månader. Se även ROHO begränsad garantitillägg som medföljer produkten, eller kontakta kundtjänst.

ROHO, Inc. har en policy av ständiga förbättringar av produkterna och förbehåller sig rätten att ändra i detta dokument. Den senaste versionen av det här dokumentet finns på ROHO.com.

© 2013, 2016 ROHO, Inc.

ROHO®, DRY FLOATATION® och AGILITY® är registrerade varumärken som tillhör ROHO, Inc.

Produkter i det här dokumentet kan omfattas av ett eller flera amerikanska och utländska patent och varumärken. För ytterligare detaljer se ROHO.com.



ROHO, Inc.

Huvudkontor:

100 North Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429, USA

Post/leveransadress:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900, USA

USA: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449 • Kundtjänst: cc@roho.com

Utanför USA: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518 • intl@roho.com

ROHO.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Item # T20203, Revision: 6/20/16



The Quality Management System of ROHO, Inc. is certified to ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.