



LTV Seat®  
Owner's Manual



**Paketinhalt**  
LTV® Sitzkissen  
LTV Bezug  
Gebrauchsanleitung  
Handpumpe  
Reparatur-Kit

## LTV Seat® Gebrauchsanleitung

### So stellen Sie den Your LTV Sitz ein (LTV Seat):

1. Drehen Sie das Ventil nach links, um es zu öffnen. Pumpen Sie es mit der Handpumpe auf, bis Sie sehen können, dass alle Luftzellen gefüllt sind. Schließen Sie das Ventil, indem Sie es nach rechts drehen, und entfernen dann die Handpumpe.
2. Legen Sie den LTV Sitz auf Ihre Sitzfläche: Die rutschfeste Seite des LTV Bezugs sollte nach unten liegen, der Reißverschluss nach hinten zeigen. Das Ventil sollte sich vorne links befinden.
3. Setzen Sie sich in Ihrer normalen Sitzhaltung auf das LTV Sitzkissen.
4. Öffnen Sie das Ventil, um Luft abzulassen. Der Luftdruck wird schwächer und Sie sinken langsam in das LTV Sitzkissen. Lassen Sie so lange Luft ab, bis Sie eine komfortable Haltung erreicht haben, dann drehen Sie das Ventil rechts herum wieder zu. Sie können Luft ein- und ablassen, bis Sie eine bequeme Sitzhaltung erreicht haben.

### So reinigen Sie den LTV Bezug:

Entfernen Sie den Bezug vom Sitzkissen.

Bezug aus gestepptem Stoff: Maschinwäsche kalt,

Schonwaschgang, mit ähnlichen Farben. Zum Trocknen aufhängen.

Bezug aus Ultraleather™: Handwäsche mit milder Seife. Trocken abwischen oder aufhängen.



### So reinigen Sie das LTV Sitzkissen:

1. Schließen Sie das Ventil und legen Sie das Sitzkissen in eine große Wanne. Verwenden Sie flüssiges Geschirrspülmittel oder einen anderen Mehrzweckreiniger für allgemeine Reinigungszwecke. Befolgen Sie die Anweisungen zur Oberflächenreinigung auf dem Produktetikett.
2. Verwenden Sie eine weiche Kunststoffbürste, einen Schwamm oder ein Tuch, um alle Oberflächen sanft abzureiben.
3. Sitzkissen mit sauberem Wasser abspülen und mit einem Handtuch trocken reiben oder zum Trocknen aufhängen.
  - NICHT direktem Sonnenlicht aussetzen.
  - KEINE Reiniger für automatische Geschirrspüler verwenden, da diese ätzend und nicht für die Handwäsche geeignet sind.

### **Achtung:**

- Schützen Sie den LTV Sitz vor scharfen Gegenständen und heißer Asche.
- Den LTV Sitz NICHT als Schwimmhilfe verwenden. Es trägt Sie NICHT im Wasser.

LTV® Sitzkissen made in the U.S.A.

ROHO, Inc. LTV®, LTV Seat®, ROHO®, und shape fitting technology® sind eingetragene Markenzeichen der ROHO, Inc. Ultraleather™ ist ein eingetragenes Markenzeichen von Ultrafabrics.

## Beschränkte Garantie

Was ist durch die Garantie abgedeckt? ROHO, Inc. deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Sie die mitgelieferten Bestandteile ersetzen.

Für welche Zeitdauer gilt die Garantie? 12 Monate ab dem ursprünglichen Kaufdatum, mit Ausnahme des Bezugs, auf den eine 6-monatige beschränkte Garantie gewährt wird.

Was ist durch die Garantie nicht abgedeckt? Ein Produkt, das missbräuchlich verwendet oder bei einem Unfall bzw. durch "höhere Gewalt" wie Überschwemmungen, Tornados, Erdbeben, Feuer etc. beschädigt wurde. Sind die mitgelieferten Komponenten durch andere, nicht genehmigte Ersatzteile ausgetauscht worden oder wurden Änderungen am Produkt durchgeführt, erlischt die Garantie.

Was wir für Sie tun: Wir reparieren oder ersetzen Produkte mit Material- oder Verarbeitungsfehlern nach eigenem Ermessen innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Einsenden des Produkts und schicken es an Sie zurück. Es fallen keine Versandkosten für Sie an.

Verpflichtungen des Kunden: Innerhalb der U.S.A. muss sich der Kunde unter [warranty@roho.com](mailto:warranty@roho.com) oder der gebührenfreien Nummer 1-800-851-3449 an die Garantieabteilung wenden. Außerhalb der U.S.A. wenden Sie sich bitte an den ROHO International-Händler Ihres Landes. Anmerkung: Alle Teile, die ohne vorherige Genehmigung an ROHO, Inc. gesendet werden, werden nicht an den Kunden zurück geschickt.

Fragen? Siehe Kontaktinformation.

Haftungsausschluss: Alle stillschweigenden Garantien, einschließlich derer für MARKTGÄNGIGKEIT und EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, sind ebenfalls auf den vorstehend spezifizierten Zeitraum, der für die Produkttypen oben im Abschnitt "Für welche Zeitdauer gilt die Garantie?" angeführt ist, beschränkt. ; alle Beschwerden wegen Verletzungen derartiger stillschweigender oder ausdrücklicher Garantien müssen innerhalb dieses Zeitraums erhoben werden. ROHO, Inc. übernimmt keine Haftung für beiläufig entstandene oder mittelbare wirtschaftliche oder Sachschäden, gleichgültig, ob diese aufgrund einer Verletzung von ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder aus einem sonstigen Grund auftreten.

Ihre Rechte und die Auswirkungen dieser Garantie auf Ihre Rechte: Diese Garantie beschränkt die Dauer aller stillschweigenden Garantien gemäß der vorstehenden Klausel und beschränkt Schadenersatzleistungen für bei Begleit- oder Folgeschäden bzw. schließt derartige Leistungen ganz aus. Manche Gerichtsbarkeiten erlauben keine zeitliche Beschränkung von stillschweigenden Garantien, und manche Gerichtsbarkeiten erlauben keinen Ausschluss bzw. keine Beschränkung von bei Begleit- oder Folgeschäden, so dass diese Klauseln möglicherweise nicht auf Sie zutreffen. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte; jedoch stehen Ihnen je nach der zuständigen Gerichtsbarkeit möglicherweise weitere Rechte zu.

<b>Kontaktinformation</b>	
In den U.S.A.	Tel.: 1-800-851-3449 • Fax: 1-888-551-3449 Garantieservice: <a href="mailto:warranty@roho.com">warranty@roho.com</a> Kundenservice: <a href="mailto:cc@roho.com">cc@roho.com</a>
Außerhalb der U.S.A.	<a href="mailto:intl@roho.com">intl@roho.com</a> Tel.: 1-618-277-9150 • Fax: 1-618-277-6518 Eine Liste mit ROHO International Fachhändlern finden Sie unter <a href="http://roho.com">roho.com</a> .
Wenn Sie angewiesen wurden, einen Artikel zurückzusenden, verwenden Sie die folgende Adresse:	ROHO, Inc. 1501 South 74th Street Belleville, IL 62223
ROHO, Inc. hat eine Richtlinie der ständigen Produktverbesserung und behält sich das Recht vor, dieses Dokument jederzeit zu ändern. Die derzeitige Version des Dokuments können Sie unter <a href="http://roho.com">roho.com</a> einsehen.	
Dieses Produkt kann durch ein oder mehrere US- und ausländische Patente und Markenzeichen geschützt sein. Genaueres erfahren Sie unter <a href="http://roho.com">roho.com</a>	



Manufactured by ROHO, Inc.

100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449

Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

[TheROHOStore.com](http://TheROHOStore.com)



T36000

Revision: 08/20/15

Qty:

Print Date: